

クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト 使用方法


キット内容 ※1箱5セット入り




外箱



測定カセット袋

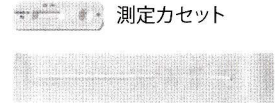


滅菌綿棒

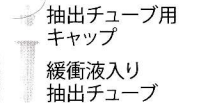


抽出チューブ用キャップ
緩衝液入り抽出チューブ

1 滅菌綿棒を鼻孔に挿入

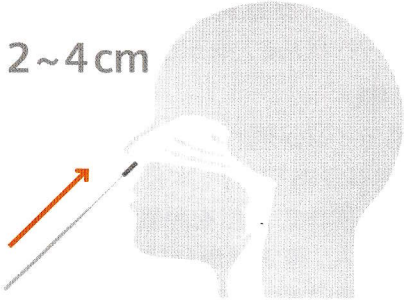

キット同梱の滅菌綿棒を使用し、片方の鼻孔に慎重に挿入します。抵抗を感じる場合は、それ以上挿入しないでください。

2 両方の鼻腔から検体を採取

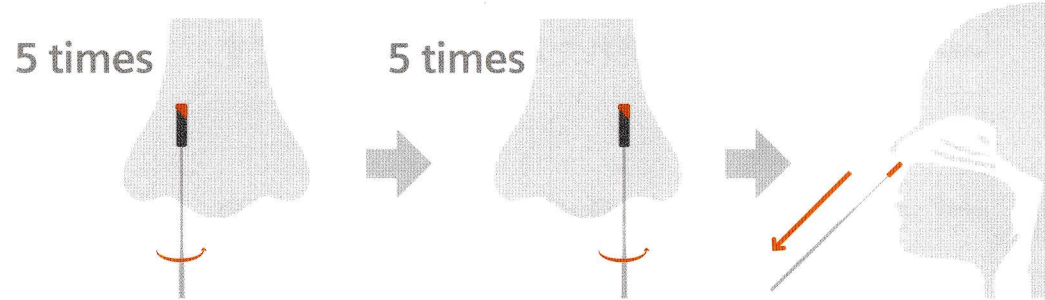


鼻腔の粘膜に沿って滅菌綿棒を5回ほど回転させ、粘液と細胞の両方を確実に採取します。

もう一方の鼻孔についても同じ滅菌綿棒を用いてこの手順を繰り返し、両方の鼻腔から十分に検体を採取します。


鼻腔から滅菌綿棒を引き出し、検体の前処理に進みます。

3 抽出チューブをスタンドに準備

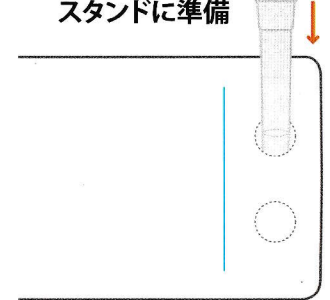

外箱裏面に印刷された☉に抽出チューブを差し込み、上部のシール栓を外します。


4 検体を緩衝液に浸す(検体の前処理)

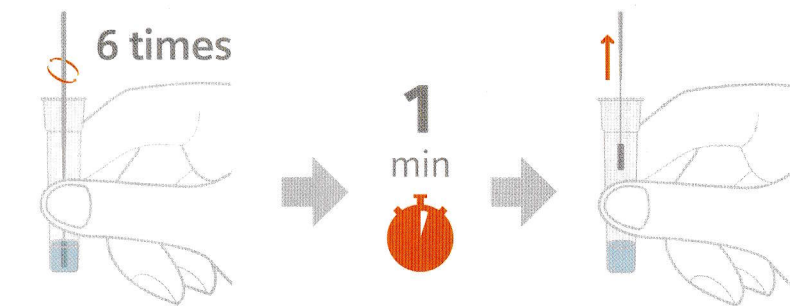

抽出チューブに滅菌綿棒を入れ、滅菌綿棒の先端を抽出チューブの底と側面に押し当てながら、6回以上回し、滅菌綿棒を入れたまま1分間待ちます。


1分後、抽出チューブを外側から数回押し、検体を絞るように滅菌綿棒を引き抜きます。

5 キャップ取り付け

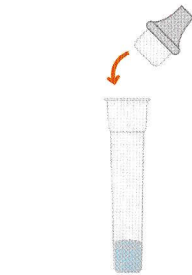


抽出チューブ用キャップの広い部分を抽出チューブに取り付け、隙間がないことを確認します。

6 測定検体溶液を滴下

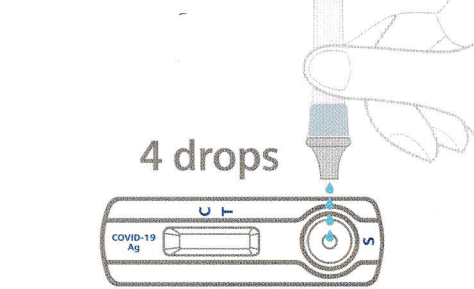

測定カセット袋から測定カセットを取り出し、水平になる場所に置きます。抽出チューブを垂直に持ち、測定検体の溶液を4滴(およそ100μL)測定カセットに加えます。

7 結果確認

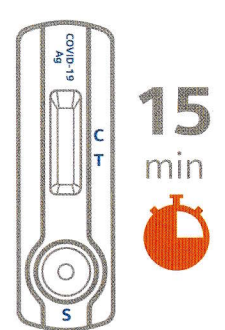

15分経過後、結果を確認します。



SCAN ME!

動画ではさらに詳しくご覧いただけます。