


測定結果の判定方法




陽性

コントロールライン (C) と測定ライン (T) が2本とも現れた場合、結果は**陽性**です。

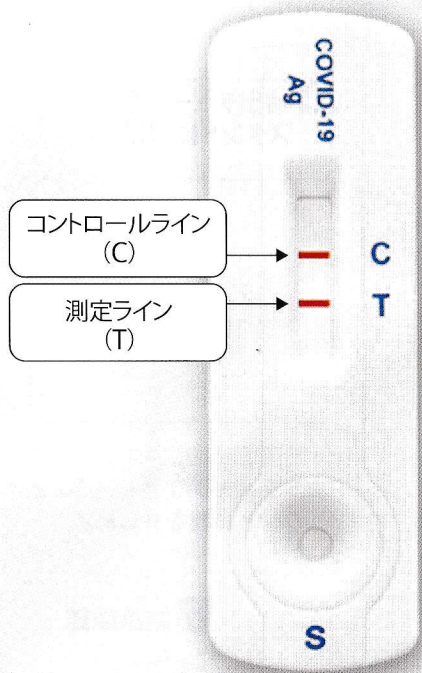

陰性

コントロールライン (C) のみ現れた場合、結果は**陰性**です。

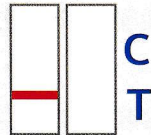

無効

測定後コントロールライン (C) が現れない場合、結果は**無効**です。*

各ラインの表示について

Q: Cのラインが薄い

A: 色が薄くてもラインが現れた場合は、操作が正しく行われたことを示します。

Q: Tのラインが薄い

A: 色が薄くてもラインが現れた場合は陽性とみなす必要があります。本品は定性測定のため、検体の濃度を評価することはできません。確定診断には臨床症状やPCR等、他の検査結果と合わせて医師が総合的に判断してください。

測定結果の判定のほか、
基本的事項、操作方法に
ついてのQ&Aはこちら



※無効となった原因として、検体採取及び操作手順が適切でなかったこと、または測定カセットの期限切れにより劣化していることが考えられます。新しい測定カセットにて再測定を実施ください。

重要な基本的注意

- 本品の判定が陰性であっても、SARS-COV-2感染を否定するものではありません。
- 検査に用いる検体については、厚生労働省より公表されている「新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) 病原体検査の指針」を参照してください。
- 診断は厚生労働省より発表されている医療機関・検査機関向けの最新情報を参照し、本製品による検査結果のみで行わず、臨床症状も含めて総合的に判断してください。
- 鼻腔ぬぐい液を検体とした場合、鼻咽頭ぬぐい液に比べ検出感度が低い傾向が認められているため、検体の採取に際して留意してください。
- 検体採取及び取扱いについては、必要なバイオハザード対策を講じてください。

製造販売元

シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社

〒141-8673 東京都品川区大崎1-11-1 ゲートシティ大崎 ウエストタワー

www.clinitest.siemens-healthineers.com/jp



SARSコロナウイルス抗原キット

クリニテスト COVID-19 抗原迅速テスト

体外診断用医薬品

承認番号:30400EZ00015000